

Mauser Einrichtungssysteme GmbH & Co. KG • Nordring 25 • D-34497 Korbach

An alle betroffenen Betreiber der Pflegebetten

VSA – 644 in Verbindung mit der
VS- Aufstehhilfe

Datum : 8.02.2016

Dringende Sicherheitsinformation zur VS - Aufstehhilfe

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach unseren Unterlagen haben wir Ihre Einrichtung mit Pflegebetten VSA 644 sowie mit dem Zubehör „VS – Aufstehhilfe“ beliefern dürfen.

Wir möchten, dass unsere Betten auch weiterhin sicher zum Wohle Ihrer Bewohner eingesetzt werden.

Bitte beachten Sie daher nachfolgenden Hinweis:

Uns ist gemeldet worden, dass es bei montierter VS – Aufstehhilfe zu einem schwerwiegenden Unfall gekommen ist. Bis zur endgültigen Klärung dieses Vorkommnisses ist es daher erforderlich,

die VS – Aufstehhilfe sofort außer Betrieb zu nehmen.

Bitte stellen Sie in Ihrer Organisation sicher, dass alle Anwender der o.a. Produkte und sonstige zu informierende Personen Kenntnis von dieser **Dringenden Sicherheitsinformation** erhalten. Sollten Sie die Produkte an Dritte weitergegeben haben, leiten Sie bitte diese Information sofort weiter.

Detailinfo zur Außerbetriebnahme siehe nächste Seite:


1/2

mauser archive**mauser** care**mauser** office**mauser** services**mauser** trade

Mauser Einrichtungssysteme GmbH & Co. KG Nordring 25 D-34497 Korbach Ein Unternehmen der VAUTH-SAGEL Gruppe

phone +49 [0] 5631 562 - 0
fax +49 [0] 5631 562 - 553
info@mauser-moebel.de
www.mauser-moebel.deGeschäftsführer: Heinz O. Sagel
Thomas Sagel und Claus SagelSitz der Gesellschaft
Brakel - Erkeln
KG HR A 2976 Paderborn
GmbH HR B 4373 Paderborn
USt - IdNr. DE 19 51 88 33 7
StNr. 5|326|5852|1516Bankverbindung
Volksbank Paderborn | Höxter
Kto - Nr. 9000 705 300
BLZ 472 60121
IBAN DE54 4726 0121 9000 7053 00
BIC DGPBDE 3MXXXBankverbindung
NORD / LB
Kto - Nr. 2082923
BLZ 250 500 00
IBAN DE46 2505 0000 0002 0829 23
BIC NOLADE 2HXXX

Die Außerbetriebnahme ist sehr einfach möglich !

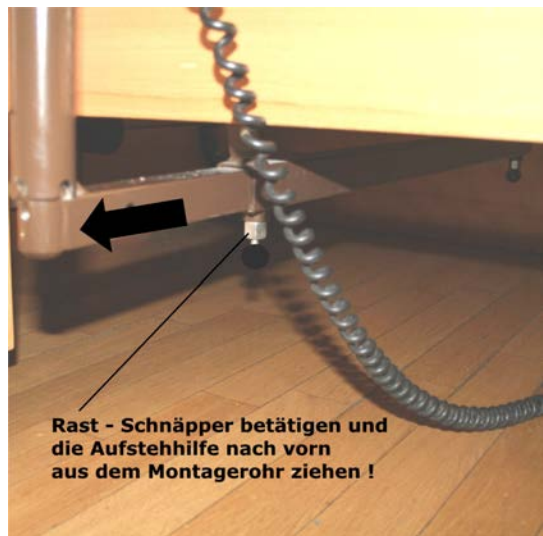

Nach erfolgter endgültiger Klärung des Vorkommnisses werden wir Sie bezüglich der notwendigen weiteren Vorgehensweise unverzüglich informieren.

Sollten Sie weitere Informationen benötigen, setzen Sie sich bitte mit Herrn Kruse, stellvertretender Sicherheitsbeauftragter nach § 30 MPG, in Verbindung!
Tel.: 05733678010

Mit freundlichen Grüßen

Mauser Einrichtungssysteme GmbH & Co. KG

Kiesweg 2

D 37688 Beverungen